

## Bruksanvisning

Det finnes tusenvis av tabletter med forskjellig hårdhet, størrelse og ytre belegg rundt preparatet. I legemiddelhåndboken er det beskrevet hvilke preparater som ikke skal knuses.

### 1. Forberedelser – det er enkelt og lett!

Snu apparatet og se på undersiden hvor du finner av/på knappen. Pass på at den står i posisjonen: **på**

Plasser så apparatet på et fast underlag, på en benk, et bord, eller på medisinvognen.



### 2. Ta fram en engangspose

Bruk bare engangsposene som følger med apparatet

Plasser en tablett av gangen i posen og pass på at alle tablettene ligger plant mot posens innside. Begynn å fylle tablettene i posen fra bunnen og oppover

For best mulig resultat: fyll aldri posen helt. La det alltid være minst **2,5 cm** til toppen av posen.

Brett kanten på posen øverst, helst dobbelt. Dette hindrer luftspredning av partikler fra legemidlet.

3. Hold så posen med medisiner i den ene hånden og plasser den i åpningen midt på apparatet. Trykk samtidig på startklappen med den andre hånden.



4. Avhengig av tablettenes størrelse, vil det ta 4–5 sekunder å knuse 2–3 tabletter. Hold på lengre dersom pulveret skal være finere. Du regulerer selv tiden ved å trykke på startknappen på toppen av apparatet.

Det er enkelt, det **skal** være lett....

